


本使用説明書は、お読みになった後も必ず大切に保管してください

本品の使用に際しては必ず本使用説明書をよくお読みください

アキレス腱装具 使用説明書

【装着手順】


①

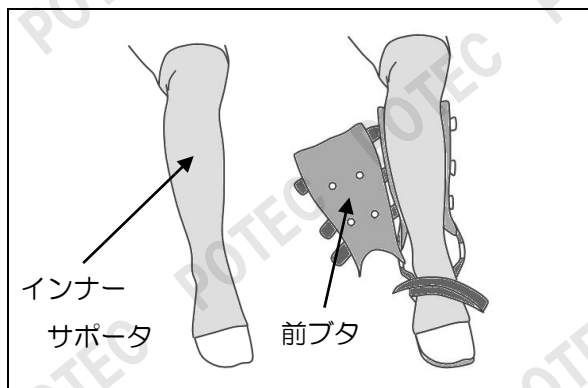

汗とりと肌当りを良くするために、付属のインナーサポータを装着して下さい。
サポータが長ければ、上下どちらかで折り返して使用して下さい。

装具の前面から足を入れます。
かかと、ふくらはぎ後面をしっかりと装具に入れてください。

②

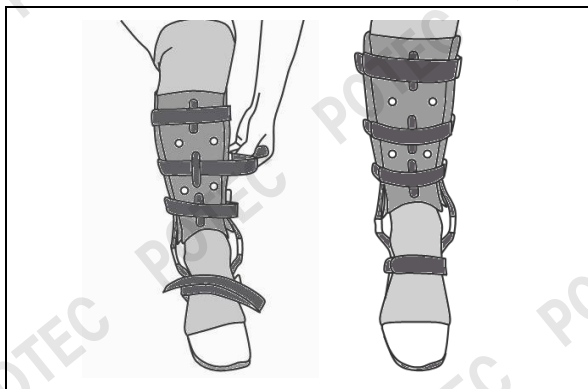

足首のベルトを締めます。

すねに前フタをかぶせ、しっかりとベルトを締めてください。

付属品として、装具の上から履けるオーバーシューズを用意していますので、ご利用ください。

③



足首のネジや、底のくさび状のパーツは回復度合いによって、医師または、担当の義肢装具士が調整します。

ご自身では、調整しないようにして下さい。

【使用上の注意】

- 本品の使用に際しては医師もしくは義肢装具士の指示・指導に従い、その他の方法・用途では、絶対に使用しないでください。
- 装具を装着し、傷、痛みが出た場合、医師、または担当の義肢装具士にご相談ください。また、ご不明な点などございましたら下記までお問い合わせください。
- 本品の加工・改造は絶対に行わないでください。



(有)ピー・オー・テック (有)高橋義肢製作所

TEL : 073-436-7050