


ダーメンコルセット (胸腰椎用)

使用説明書

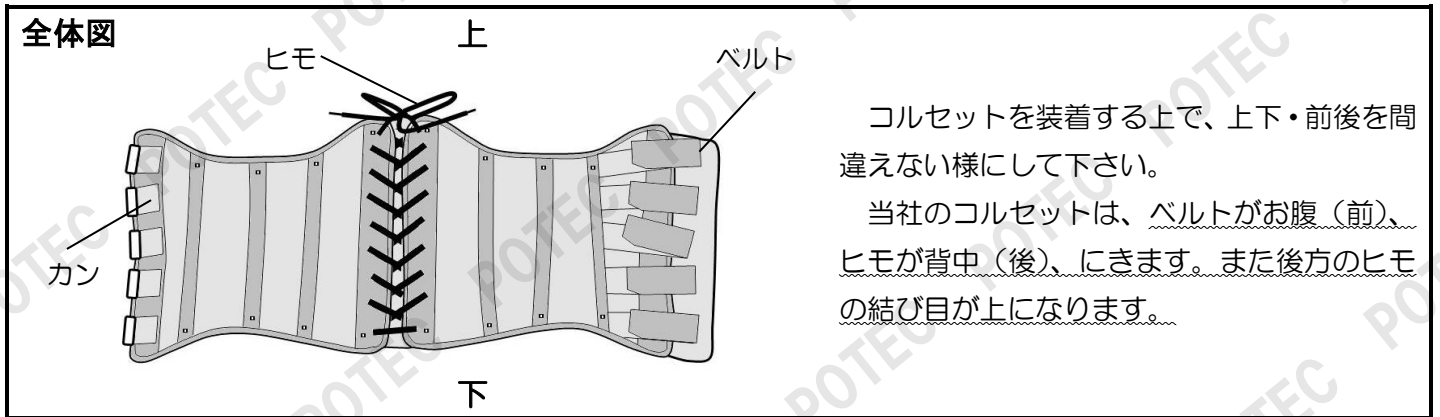

【装着手順】


<p>①</p>	<p>②</p>	<p>③</p>
<p>方向を確認し、コルセットを体にまきます。</p> <p>※コルセットは汗を吸いません。</p> <p>必ず、シャツなどの上から装着するようにして下さい。</p>	<p>ベルトは真ん中から締めていきます。カンにベルトを通し、折り返して止めて下さい。ベルトを締めたとき、前の開きが体の中心に来るように装着して下さい。</p>	<p>全てのベルトを締めて、装着完了です。下2本のベルトは少し強めに締めて下さい。</p>

★ 装着のポイント

椅子に座ったときにコルセットの下縁が太ももの付け根（足を曲げたときにできるしわの部分）に丁度当たらない程度に位置に装着して下さい。

★ トイレの時に

コルセットの上に、下着とズボンを上からかぶせて履いていただくと、トイレの度にコルセットをはずさないで済みます。

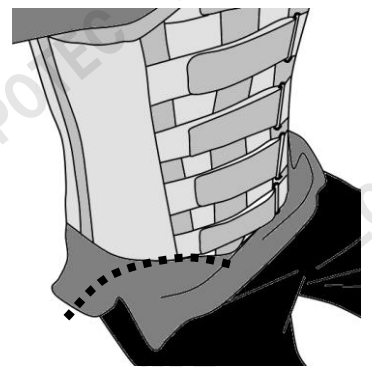

- 使用に際しては医師又は義肢装具士の指導に従い、その他の方法・用途では、使用しないで下さい。
- 装具を装着し、傷や痛みが出た場合は、速やかに医師又は担当の義肢装具士にご相談下さい。
- 勝手に本品の加工・改造は行わないで下さい。



(有)ピー・オー・テック (有)高橋義肢製作所

TEL : 073-436-7050