


本使用説明書は、お読みになった後も必ず大切に保管してください  
本品の使用に際しては必ず本使用説明書をよくお読みください

# 足底装具(ホルダータイプ) 使用説明書


## 【各部の名称】

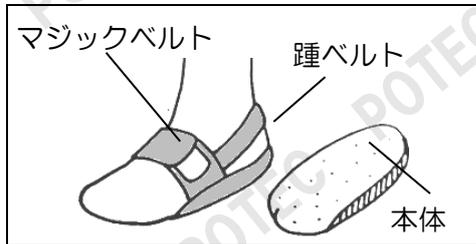

装具は、足に装着するためのカバー(ホルダー)と、その中に入る本体で構成されています。

## 【装着手順】


①

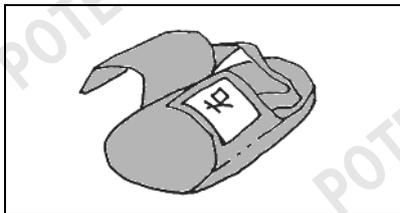

### 左右の確認

マジックベルトに左右の表示がありますので、確認してください。


②

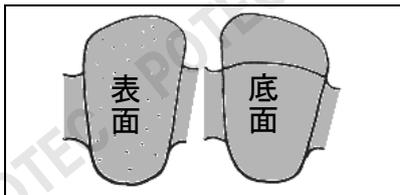

### 表面・底面の確認

カバー(ホルダー)は足底装具本体が入る袋になっています。袋のふたになっている方(二重になっている方)が底面になります。

③

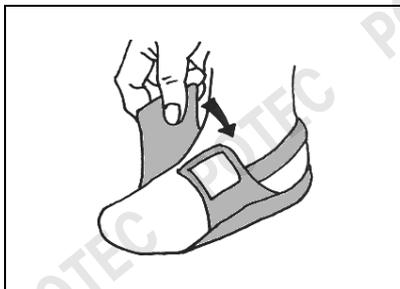

### 装着

踵の上に踵ベルトを引っ掛け、足の甲の部分でマジックベルトをしっかり止めてください。

素足に装着し、その上から靴下を履くと、装具がずれにくく、靴も履きやすくなります。

## 【使用上の注意】

※本品の使用に際しては医師もしくは義肢装具士の指示・指導に従い、その他の方法・用途では、絶対に使用しないでください。

※本体を取り出せば、カバー(ホルダー)は洗えます。手洗い、陰干しをお勧めします。

※本体は洗える物と洗えない物があります。担当義肢装具士にご確認ください。

※装具を装着したまま靴を履く場合、靴によっては、履き難くなったり、歩きにくくなる場合もあります。適した靴が判らない場合、担当の義肢装具士にご相談ください。

※装具を装着し、傷、痛みが出た場合、医師、または担当の義肢装具士にご相談ください。また、ご不明な点などございましたら下記までお問い合わせください。

※本品の加工・改造は絶対に行わないでください。



(有)ピー・オー・テック (有)高橋義肢製作所

TEL : 073-436-7050