


# ダーメンコルセット(腰椎用)

## 使用説明書

### 全体図

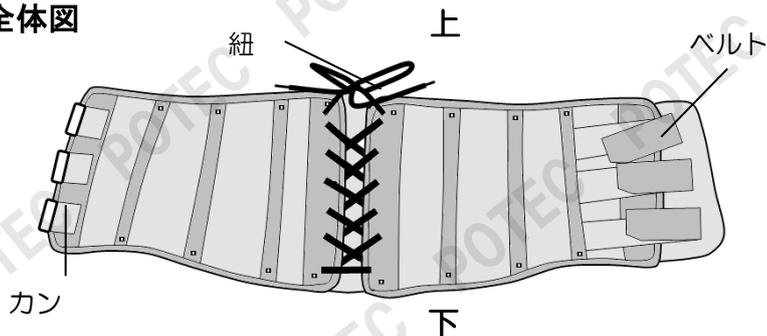


コルセットを装着する上で、上下・前後を間違えない様にして下さい。

当社のコルセットは、ベルトがお腹(前)、ヒモが背中(後)、にきます。また後方のヒモの結び目が上になります。

### 【装着手順】

①

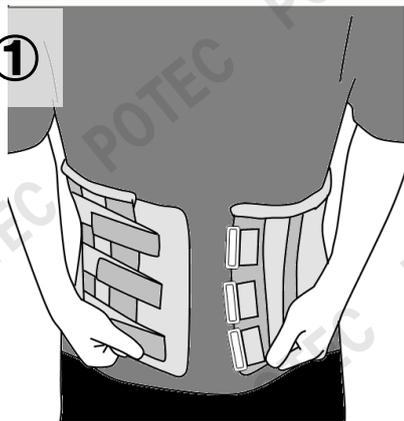


方向を確認し、コルセットを体にかまします。

※コルセットは汗を吸いませぬ。


必ず、シャツなどの上から装着するようにして下さい。

②

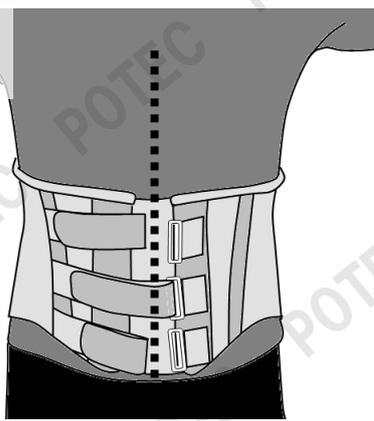

ベルトは真ん中から締めていきます。カんにベルトを通し、折り返して止めて下さい。ベルトを締めたとき、前の開きが体の中心に来るように装着して下さい。

③

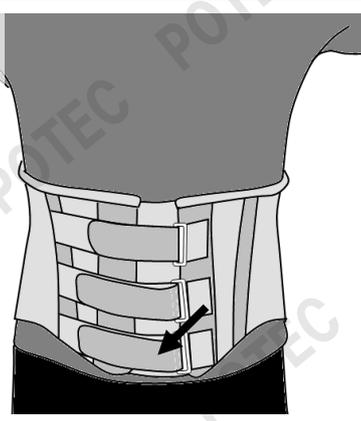


全てのベルトを締めて、装着完了です。下2本のベルトは少し強めに締めて下さい。

### ★ 装着のポイント

椅子に座ったときにコルセットの下縁が太ももの付け根(足を曲げたときにできるしわの部分)に丁度当たらない程度に位置に装着して下さい。

### ★ トイレの時に

コルセットの上に、下着とズボンを上からかぶせて履いていただくと、トイレの度にコルセットをはずさないで済みます。

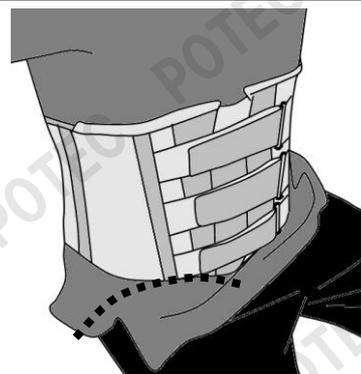

- 使用に際しては医師又は義肢装具士の指導に従い、その他の方法・用途では、使用しないで下さい。
- 装具を装着し、傷や痛みが出た場合は、速やかに医師又は担当の義肢装具士にご相談下さい。
- 勝手に本品の加工・改造は行わないで下さい。



(有)ピー・オー・テック (有)高橋義肢製作所

TEL: 073-436-7050